



आइये जानें

डीप फ्रीज़र में आइस पैक जमाना

डीप फ्रीज़र का इस्तेमाल केवल आइस पैक जमाने हेतु करें। इसमें वैक्सीन का भंडारण न करें।

डीप फ्रीज़र

जमाने हेतु रखे गए पिघले आइस पैक

भंडारण हेतु जमे आइस पैक। जमे आइस पैक बड़े भाग में अधिकतम आधी ऊंचाई तक रखें।

बड़े भाग का इस्तेमाल मुख्यतः आइस पैक जमाने तथा आवश्यकतानुसार उनके भंडारण हेतु करें। एक बार में केवल 20 से 25 पिघले आइस पैक जमाने हेतु रखें (सूखे कपड़े से पोंछने के बाद खड़ा करके), जिससे ठंडी हवा का उचित संचार हो सके।

छोटे भाग में जमे आइस पैकों का भंडारण करें। आवश्यकता पड़ने पर जमे आइस पैक कोल्ड बॉक्स में भी रखे जा सकते हैं।

डीप फ्रीज़र से लेखने पर

फ्रीज़र के भीतर के तापमान की जांच थर्ममीटर से प्रत्येक दिन दो बार करें (सुबह एवं शाम)। इसके तापमान को -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नियंत्रित रखें।